


# 停電時に関する重要なお知らせ

## 【いす式階段昇降機（バッテリー式）をご利用のお客様へ】

- ・ 停電に備えて、下記の手順で電源を切ってください。
- ・ 停電終了後は、逆の手順（②→①）で電源を入れて下さい。

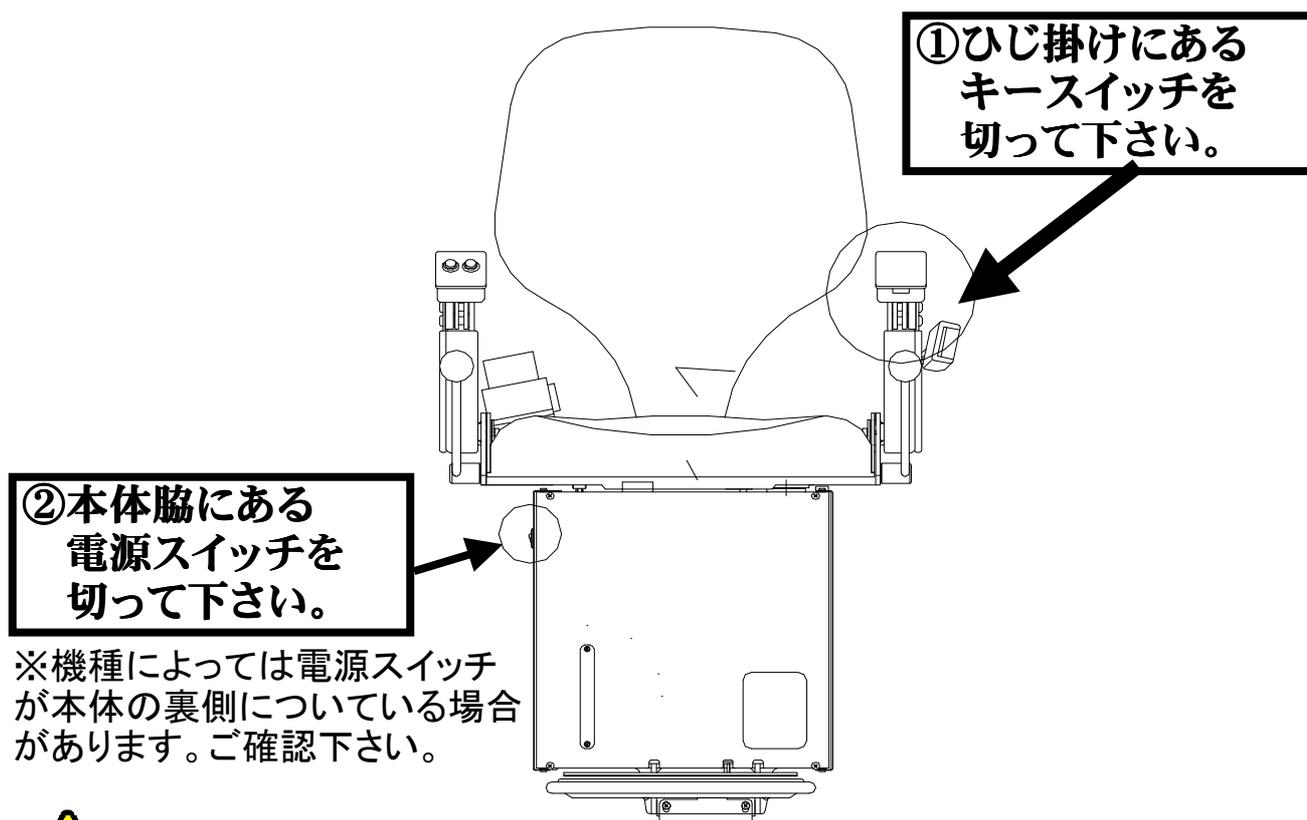

## ⚠️ ご注意

- ・地震発生時、または停電時には絶対にご利用にならないで下さい。
- ・電源スイッチが「入」の状態で停電が始まると、「ピピピ…」と警告音がなりますが、電源スイッチを切れれば止まります。
- ・しばらくすると警告音は止まります。暗闇での室内の移動は危険ですので、ご注意ください。停電終了後は上記の手順で、電源を入れて下さい。
- ・電源を回復した後は、誰も乗っていない状態で試運転をし、動作に異常がない事を確認してからご利用下さい。

※ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡下さい。

お問い合わせ： **03-5838-1613** 平日 9:00~17:00

**株式会社マイクロエレベーター 鹿浜センター**

※上記の時間以外の時間は、電話は夜間緊急窓口へ転送されます